



FACE SHIELD

mVISOR7001

användarmanual





ANVÄNDARMANUAL

Avsedd användning

mVisor 7001 är ett skyddsvisir, godkänt som skydd mot droppar och stänk av vätska. Visiret ska användas i miljöer där användaren utsätts för vätskestänk och/eller droppsmitta.

Produkten får endast användas i enlighet med denna användarmanual.

Efter montering (se framsida) av mVisor 7001

TA PÅ VISIRET Ta på plasthandskar. Justera huvudband över och runt huvudet så att det passar huvudformen.

OBS! Kontrollera alltid att mVisor 7001 sitter stabilt innan arbete påbörjas.

TA AV VISIRET För att ta av visiret utan att riskera att få smitta på händer eller ansikte: Ta på plasthandskar. Ta tag i spännet bakom huvudet, dra försiktigt utåt och ta av visiret rakt framåt. Undvik kontakt med visirets framsida. Rengör visiret enligt anvisning.

Skötsel och rengöring

1. Desinfektera händerna med handsprit
2. Ta på skyddshandskar
3. Desinficera och rengör visir samt huvudband med tvål och vatten, alternativt ytdesinfektion
4. Häng upp eller placera visiret så att det kan torka, alternativt torka av med kliniskt ren engångstrasa
5. Förvara det torra och desinficerade visiret i ren plastpåse eller originalförpackning inför återanvändning

Denna produkt har tillverkats enligt kraven i Regulation (EU) 2016/425, enligt tillämplbara krav i standarden EN 166:2001, enligt certifikatet No. 20/3121/00/0161 utfärdat av AITEX, Plaza Emilio Sala No. 1, Alcoi, Spain, Notified Body 0161.

mVisor 7001 kan användas så länge visiret har fullgod sikt och är fri från åverkan eller skada. Kontrollera regelbundet att huvudband och lins är fria från sprickbildningar.

Teknisk specifikation

Lins	Justerbart huvudband	Skum
Tjocklek: 1,8 mm	Tjocklek: 1,2 mm	Tjocklek: 30 mm
Längd: ställbart 219 mm	Bredd: 25 mm	Bredd: 30 mm
Vikt: 146 gr	Vikt : 24,2 gr	Längd: 200-330 mm
Material : polykarbonat, PC	Material : polypropylen, PP	Vikt: 6,2 gr
		Material: BPI PolyEther+PolyEster



Dokumentation för nedladdning

Besök: mshield.se/docs

Kontakt

mShield | Anders Anderssons väg 12, 285 35 | Markaryd, Sverige | info@mshield.se | +46 433 128 45