



FACE SHIELD

mVISOR7001

teknisk specifikation



TEKNISK SPECIFIKATION: mVISOR 7001

Användning

mVisor 7001 är ett skyddsvisir, godkänt som skydd mot droppar och stänk av vätska. Visiret ska användas i miljöer där användaren utsätts för vätskestänk och/eller droppsmitta.

Produkten får endast användas i enlighet med användarmanualen.

- Heltäckande skydd för ansiktet, för vätskestänk och droppsmitta
- Fullgod sikt eftersom visiret är klart, transparent och motverkar imma
- Bekvämt – skumvadderat och huvudbandet kan anpassas efter önskemål
- Låg vikt: <200 g

Produktbeskrivning


Produktnamn: mVisor 7001
Produktbeskrivning: Skyddsvisir

Märkning

Visir: Marka Pac 1 S
Huvudband: Marka Pac EN 166 3 S

EG-försäkran kan laddas ner på
mshield.se/docs

Tillverkat enligt krav

Regulation (EU) 2016/425	•
CE EN 166:2001 	•
No. 20/3121/00/0161 (AITEX)	•
Plaza Emilio Sala No. 1	•
Alcoi, Spain, Notified Body 0161	•

Teknisk specifikation

Lins	Justerbart huvudband	Skum
Tjocklek: 1,8 mm	Tjocklek: 1,2 mm	Tjocklek: 30 mm
Längd: ställbart 219 mm	Bredd: 25 mm	Bredd: 30 mm
Vikt: 146 gr	Vikt: 24,2 gr	Längd: 200-330 mm
Material: polykarbonat, PC	Material: polypropylen, PP	Vikt: 6,2 gr
		Material: BPI PolyEther+PolyEster

Skötsel

mVisor 7001 kan användas så länge visiret har fullgod sikt och är fri från åverkan eller skada. Kontrollera regelbundet att huvudband och lins är fria från sprickbildningar.

- Förvaras i försluten originalförpackning för bästa hållbarhet
- Lämna ej visiret i direkt solljus
- Skadat eller repat visir måste bytas ut

Rengör visiret så här:

1. Desinfektera händerna med handsprit
2. Ta på skyddshandskar
3. Desinficera och rengör visir samt huvudband med tvål och vatten, alternativt ytdesinfektion
4. Häng upp eller placera visiret så att det kan torka, alternativt torka av med kliniskt ren engångstrasa
5. Förvara det torra och desinficerade visiret i ren plastpåse eller originalförpackning inför återanvändning



Återvinning

När visiret är förbrukat demonteras det i omvänd ordning enligt tidigare monteringsbeskrivning. Visir samt huvudband källsorteras enligt gällande lokala återvinningsregler som hårdplastavfall.



Dokumentation för nedladdning

Besök: mshield.se/docs

Kontakt

mShield | Anders Anderssons väg 12, 285 35 | Markaryd, Sverige | info@mshield.se | +46 433 128 45